



USER MANUAL



WE HAVE YOU COVERED

Our passionate team brings you innovative, quality mobility solutions. Our products are reliable, sleek, and designed with simplicity so that you can rest assured that they work when you need them.

Thanks to our out of the box thinking, we are vigilant to meet your mobility needs with our simple and practical solutions. We recognize the important role that safety plays in consumer choices and are proud to offer a line of products that maintain the safety features found in your vehicle. Backed by third party verification for compliance to applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards and Canadian Motor Vehicle Safety Standards, our products are engineered for safety and durability.

Our commitment to quality and safety along with our genuine desire to meet your mobility needs makes for a product we are sure you will be proud to own.





ASENTO

MANUEL DE L'UTILISATEUR (SUITE)

Accéder à votre véhicule

Votre nouvel **ASENTO** assiste votre transfert à bord de votre véhicule.

Veillez suivre les étapes suivantes:

- Après avoir ouvert la portière, déployez la planche de transfert vers le bas.
- Positionnez-vous de manière à transférer de façon sécuritaire sur l'**ASENTO**. Assurez-vous de mettre les freins sur votre fauteuil roulant pour l'empêcher de bouger.
- Une fois le transfert effectué sur l'**ASENTO**, abaissez le bras de sécurité. Ce bras de sécurité a été conçu pour vous aider à garder votre équilibre pendant que l'**ASENTO** monte ou descend.



MANUEL DE L'UTILISATEUR (SUITE)

Accéder à votre véhicule

- Prenez la télécommande. Appuyez et maintenez le bouton avec la flèche pointant vers le haut afin que l'**ASENTO** vous amène à la hauteur du siège de votre véhicule.
- Une fois que l'**ASENTO** a atteint la hauteur désirée, vous offrant la meilleure position pour le transfert, relâchez le bouton avec la flèche pointant vers le haut. Vous pouvez ensuite vous transférer dans le véhicule. À tout moment durant les mouvements, vous pouvez relâcher le bouton et l'**ASENTO** s'arrêtera, vous permettant de vous repositionner. Une fois que vous êtes prêt à continuer, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour reprendre votre ascension.
- Une fois votre transfert terminé, appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le bas et maintenez-le enfoncé pour abaisser l'**ASENTO** au niveau du plancher de votre véhicule. Une fois que l'**ASENTO** a atteint son point le plus bas, relâchez le bouton et rangez d'abord le bras de sécurité, suivi de la planche de transfert, en la rabattant vers le haut. Vous pouvez maintenant fermer la portière de votre véhicule.



MANUEL DE L'UTILISATEUR (SUITE)

Sortir de votre véhicule

Veillez suivre les étapes suivantes:

- Enlevez votre ceinture de sécurité et ouvrez la portière.
- Déployez la planche de transfert et abaissez le bras de sécurité.
- Prenez la télécommande.
- Appuyez sur le bouton avec la flèche pointant vers le haut et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'**ASENTO** ait atteint la hauteur désirée pour votre transfert, puis relâchez le bouton.



MANUEL DE L'UTILISATEUR (SUITE)

Sortir de votre véhicule

- Transférez-vous sur l'**ASENTO** et utilisez le bras de sécurité pour garder votre équilibre. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton avec la flèche pointant vers le bas jusqu'à ce que l'**ASENTO** ait atteint la hauteur qui vous offrira la meilleure position pour votre transfert, et relâchez le bouton.
- Rangez la télécommande.
- Remplacez le bras de sécurité avant d'effectuer votre transfert de l'**ASENTO**.
- Transférez-vous sur votre fauteuil roulant et rabattez la planche de transfert vers le haut, puis fermez la portière du véhicule.

AVERTISSEMENTS

- LA PLANCHE DE TRANSFERT DOIT ÊTRE À SON POINT LE PLUS BAS ET PLIÉE VERS LE HAUT AVANT DE FERMER LA PORTIÈRE.
- N'ESSAYEZ JAMAIS D'UTILISER L'**ASENTO** PENDANT QUE LA PORTIÈRE DU VÉHICULE EST FERMÉE OU SI LE VÉHICULE EST EN MOUVEMENT.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS ASENTO

Adapt-Solutions # 1 Ltée. (Adapt Solutions), garantit à l'acheteur original du **ASENTO** que l'équipement est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat.

Au cours de la première année de la garantie, Adapt Solutions fournira les pièces de rechange ainsi qu'un montant préétabli (déterminé par Adapt Solutions) pour la réparation si un défaut de matériel ou de fabrication était découvert. Après la première année de cette garantie, seules les pièces et les composantes seront couvertes. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre et d'autres services après la première année. Les frais d'expédition et autres frais de réparation connexes seront à la charge de l'acheteur initial.

La solution à un défaut de l'un des produits d'Adapt Solutions (**LINK; XL-BASE; XL-SEAT; ASENTO; HI-LIFT; SPEEDY-LIFT; XL-BOARD; POWER-PULL**) sera la réparation ou le remplacement de la pièce ou composante défectueuse, à la discrétion d'Adapt Solutions. Si la réparation ou le remplacement ne sont pas possibles ou ne peuvent pas être faits rapidement, Adapt Solutions peut décider de rembourser le prix d'achat de l'équipement au lieu de réparer ou de remplacer l'équipement d'origine. Adapt Solutions n'est en aucun cas, responsable des dommages indirects, accidentels ou consécutifs, que ces dommages découlent de réclamations fondées sur un contrat, une garantie, un délit civil (y compris la négligence), la responsabilité stricte ou la responsabilité des produits.

Toutes les garanties implicites, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées dans leur durée, à la durée de la garantie indiquée ci-dessus pour la composante concernée.

Cette garantie est non transférable et exclut tout dommage dû à une erreur d'installation, un mauvais usage, l'abus du produit, les accidents, les dommages physiques, des dommages lors de l'expédition, les modifications non effectuées par Adapt Solutions, ou les réparations effectuées par une personne autre que les distributeurs autorisés.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE GARANTIE OU REMBOURSEMENT

Suivez les procédures:

1. Obtenez l'autorisation de garantie en appelant votre distributeur autorisé ou directement Adapt Solutions à 1-866-641-0419.
2. Envoyez, port payé, les pièces/composantes/équipements à l'adresse fournie par votre distributeur autorisé ou à Adapt Solutions avec une preuve d'achat indiquant la date d'achat.

Si un défaut de matériel ou de fabrication est découvert, Adapt Solutions payera les frais d'expédition à l'acheteur se situant au Canada et aux États-Unis. Les frais de retour et de réparation seront la responsabilité de l'acheteur si le problème n'est pas couvert par la garantie.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Adapt Solutions n'autorise personne à prolonger la durée ou la portée de cette garantie.

Pour de plus amples informations concernant cette garantie limitée, veuillez nous contacter en composant le 1-866-641-0419 ou par écrit à l'adresse suivante :

Adapt Solutions / Département de garantie
145 Damase-Breton
St-Lambert-de-Lauzon, Québec
G0S 2W0 Canada

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Adapt Solutions # 1 Ltée., situé à St-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada, garantit que ce produit est exempt de défaut de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. Pour que la garantie soit valide, ce produit doit être installé par un distributeur autorisé et être utilisé correctement par son propriétaire. La garantie est non transférable et ne couvre aucun défaut sur le véhicule. Vous devez compléter la carte d'enregistrement et la retourner dans les 30 jours suivant l'achat. Cette garantie sera nulle et sans effet si le produit a été endommagé par un accident, un mauvais usage, par négligence ou si le produit a été modifié de quelque façon. Les pièces défectueuses doivent être retournées par un distributeur autorisé qui aura, au préalable, obtenu l'accord d'Adapt Solutions # 1 Ltée. Les pièces garanties seront alors retournées au frais de l'acquéreur. Après inspection, Adapt Solutions # 1 Ltée se réserve le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

Date installée: _____

Distributeur autorisé: _____

Signature: _____

À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS

(Placez le numéro de série ici)

WE ARE THE SOLUTION

Please contact your dealer for immediate assistance

Dealer:

TF 1.866.641.0419 | tech@adaptsolutions.com



145 Damase-Breton | Saint-Lambert, Qc G0S 2W0

TF 1.866.641.0419 | Fax 418.889.9838 | P 418.889.0419

www.adaptsolutions.com

