



# USER MANUAL



# WE HAVE YOU COVERED

Our passionate team brings you innovative, quality mobility solutions. Our products are reliable, sleek, and designed with simplicity so that you can rest assured that they work when you need them.

Thanks to our out of the box thinking, we are vigilant to meet your mobility needs with our simple and practical solutions. We recognize the important role that safety plays in consumer choices and are proud to offer a line of products that maintain the safety features found in your vehicle. Backed by third party verification for compliance to applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards and Canadian Motor Vehicle Safety Standards, our products are engineered for safety and durability.

Our commitment to quality and safety along with our genuine desire to meet your mobility needs makes for a product we are sure you will be proud to own.





**POWER-PULL**

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

### Entrer dans votre véhicule

Votre nouveau **POWER-PULL** est conçu pour faciliter la montée et la descente de la rampe de votre fourgonnette à plancher abaissé.

#### **Pour monter la rampe avec le **POWER-PULL**, veuillez suivre les étapes suivantes:**

- Après avoir ouvert la porte, déployez la rampe.
- Déplacez-vous à côté de la rampe et ramassez les crochets du **POWER-PULL**. Vous pouvez trouver utile de fixer temporairement les crochets sur le côté de votre fauteuil roulant pour l'étape suivante.
- Placez-vous face à la rampe, et placez les crochets du **POWER-PULL** de chaque côté du **cadre solide** de votre fauteuil roulant et non pas sur les repose-pieds amovibles. **PRENDRE NOTE** que la longueur des sangles a été ajustée par l'installateur de l'équipement. Dans une fourgonnette à plancher abaissé entrée latérale, il est normal qu'une sangle attachée au crochet du **POWER-PULL** soit plus longue que l'autre. **Toujours** placer la sangle la plus longue et le crochet sur le côté droit de votre fauteuil roulant. Dans une fourgonnette à plancher abaissé entrée arrière, les sangles des crochets devraient avoir la même longueur. Placer un crochet d'un côté ou l'autre ne fait aucune différence dans cette application.
- Récupérez votre télécommande, appuyez sur le bouton **ENTRER** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous soyez complètement dans le véhicule. À tout moment durant la remontée, vous pouvez relâcher le bouton **ENTRER** et le **POWER-PULL** vous maintiendra en place.
- Une fois que vous avez monté complètement la rampe et que vous êtes en sécurité dans le véhicule, appuyez sur le bouton **RELÂCHER** et retirez les sangles **POWER-PULL**. Ne retirez le **POWER-PULL** que lorsqu'il n'y a aucune chance que vous rouliez sur la rampe.

## **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

Votre **POWER-PULL** est équipé de plusieurs fonctions de sécurité. Si vous appuyez accidentellement sur le bouton **RELÂCHER** alors que vous montez ou descendez la rampe, le câble du **POWER-PULL** ne se relâchera pas. Le **POWER-PULL** est conçu pour ne se relâcher qu'une fois qu'il n'y a plus de tension ou de poids sur le câble.

Votre **POWER-PULL** est également équipé d'une fonction de sécurité qui l'empêche de tirer le fauteuil roulant au-dessus d'obstacles. Le module électronique à l'intérieur du **POWER-PULL** surveille la tension pendant votre utilisation. S'il dépasse 10 ampères, le **POWER-PULL** s'éteindra automatiquement et vous permettra d'enlever l'obstacle ou de redresser votre fauteuil roulant (par exemple: si l'obstacle est le côté de la rampe) tout en maintenant la tension sur le câble de sorte que vous ne reculez pas.

## **ATTENTION**

LE **POWER-PULL** N'EST PAS UNE ATTACHE POUR VOTRE FAUTEUIL ROULANT ET NE DEVRAIT PAS RESTER ATTACHÉ À CELUI-CI DURANT LE TRANSPORT. VEUILLEZ UTILISER UN SYSTÈME D'ARRIMAGE ADÉQUAT POUR VOTRE FAUTEUIL ROULANT.




**MANUEL DE L'UTILISATEUR**  
Sortir de votre véhicule

**Pour sortir de votre véhicule avec le POWER-PULL, veuillez suivre les étapes suivantes :**

- Ouvrez la porte du véhicule et déployez la rampe. Placez-vous pour descendre la rampe. Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de **TOUJOURS** descendre en reculant sur la rampe.
- Placez les crochets du **POWER-PULL** de chaque côté du **cadre solide** de votre fauteuil roulant et non pas sur les repose-pieds amovibles. **PRENDRE NOTE** que la longueur des sangles a été ajustée par l'installateur de l'équipement. Dans une fourgonnette à plancher abaissé entrée latérale, il est normal qu'une sangle attachée au crochet du **POWER-PULL** soit plus longue que l'autre. **Toujours** placer la sangle plus longue et le crochet sur le côté droit de votre fauteuil roulant. Dans une fourgonnette à plancher abaissé entrée arrière, les sangles des crochets devraient avoir la même longueur. Placer un crochet d'un côté ou l'autre ne fait aucune différence dans cette application.
- Récupérez votre télécommande, appuyez sur le bouton **SORTIR** et maintenez-le enfoncé. **PRENDRE NOTE** qu'à tout moment, vous pouvez relâcher le bouton et le **POWER-PULL** vous maintiendra en place.
- Une fois la descente terminée, appuyez sur le bouton **RELÂCHER** et décrochez les sangles du **POWER-PULL** de votre fauteuil roulant.

Pour une fourgonnette à plancher abaissé entrée arrière, placez simplement les crochets et sangles du **POWER-PULL** à un endroit qui sera accessible à votre retour. Pour une fourgonnette à plancher abaissé entrée latérale, placez les crochets et les sangles du **POWER-PULL** sur le récepteur installé sur votre rampe afin que le **POWER-PULL** soit accessible lorsque la rampe sera déployée à votre retour.

- Remontez la rampe et fermez la porte.

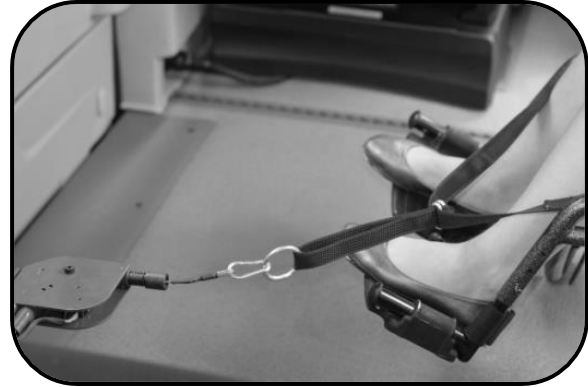

## **GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS POWER-PULL**

Adapt-Solutions # 1 Ltée. (Adapt Solutions), garantit à l'acheteur original du **POWER-PULL** que l'équipement est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat.

Au cours de la première année de la garantie, Adapt Solutions fournira les pièces de rechange ainsi qu'un montant préétabli (déterminé par Adapt Solutions) pour la réparation si un défaut de matériel ou de fabrication était découvert. Après la première année de cette garantie, seules les pièces et les composantes seront couvertes. Cette garantie ne couvre pas la main-d'œuvre et d'autres services après la première année. Les frais d'expédition et autres frais de réparation connexes seront à la charge de l'acheteur initial.

La solution à un défaut de l'un des produits d'Adapt Solutions (**LINK; XL-BASE; XL-SEAT; HI-LIFT; SPEEDY-LIFT; XL-BOARD; POWER-PULL**) sera la réparation ou le remplacement de la pièce ou composante défectueuse, à la discrétion d'Adapt Solutions. Si la réparation ou le remplacement ne sont pas possibles ou ne peuvent pas être faits rapidement, Adapt Solutions peut décider de rembourser le prix d'achat de l'équipement au lieu de réparer ou de remplacer l'équipement d'origine.

Adapt Solutions n'est en aucun cas, responsable des dommages indirects, accidentels ou consécutifs, que ces dommages découlent de réclamations fondées sur un contrat, une garantie, un délit civil (y compris la négligence), la responsabilité stricte ou la responsabilité des produits.

Toutes les garanties implicites, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont limitées dans leur durée, à la durée de la garantie indiquée ci-dessus pour la composante concernée.

Cette garantie est non transférable et exclut tout dommage dû à une erreur d'installation, un mauvais usage, l'abus du produit, les accidents, les dommages physiques, des dommages lors de l'expédition, les modifications non effectuées par Adapt Solutions, ou les réparations effectuées par une personne autre que les distributeurs autorisés.



## POUR OBTENIR DES PIÈCES DE GARANTIE OU REMBOURSEMENT

### Suivez les procédures:

1. Obtenez l'autorisation de garantie en appelant votre distributeur autorisé ou directement Adapt Solutions à 1-866-641-0419.
2. Envoyez, port payé, les pièces/composantes/équipements à l'adresse fournie par votre distributeur autorisé ou à Adapt Solutions avec une preuve d'achat indiquant la date d'achat.

Si un défaut de matériel ou de fabrication est découvert, Adapt Solutions payera les frais d'expédition à l'acheteur se situant au Canada et aux États-Unis. Les frais de retour et de réparation seront la responsabilité de l'acheteur si le problème n'est pas couvert par la garantie.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Adapt Solutions n'autorise personne à prolonger la durée ou la portée de cette garantie.

Pour de plus amples informations concernant cette garantie limitée, veuillez nous contacter en composant le 1-866-641-0419 ou par écrit à l'adresse suivante :

**Adapt Solutions / Département de garantie**  
**145 Damase-Breton**  
**St-Lambert-de-Lauzon, Québec**  
**G0S 2W0 Canada**

## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Adapt Solutions # 1 Ltée., situé à St-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada, garantit que ce produit est exempt de défaut de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. Pour que la garantie soit valide, ce produit doit être installé par un distributeur autorisé et être utilisé correctement par son propriétaire. La garantie est non transférable et ne couvre aucun défaut sur le véhicule. Vous devez compléter la carte d'enregistrement et la retourner dans les 30 jours suivant l'achat. Cette garantie sera nulle et sans effet si le produit a été endommagé par un accident, un mauvais usage, par négligence ou si le produit a été modifié de quelque façon. Les pièces défectueuses doivent être retournées par un distributeur autorisé qui aura, au préalable, obtenu l'accord d'Adapt Solutions # 1 Ltée. Les pièces garanties seront alors retournées au frais de l'acquéreur. Après inspection, Adapt Solutions # 1 Ltée se réserve le droit de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

Date installée: \_\_\_\_\_

Distributeur autorisé: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

### À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS

(Placez le numéro de série ici)

# WE ARE THE SOLUTION

*Please contact your dealer for immediate assistance*

Dealer:

TF 1.866.641.0419 | [tech@adaptsolutions.com](mailto:tech@adaptsolutions.com)



145 Damase-Breton | Saint-Lambert, Qc G0S 2W0

TF 1.866.641.0419 | Fax 418.889.9838 | P 418.889.0419

[www.adaptsolutions.com](http://www.adaptsolutions.com)

